

# vsm

## Derma<sup>®</sup> wondgel

Voor de behandeling  
van kleine snij-, schaaf-  
en brandwonden

## VSM Derma<sup>®</sup> wondgel

- VSM Derma wondgel is een medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je VSM Derma wondgel gaat gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

### DE HUID

De huid is het grootste orgaan van de mens. De belangrijkste functie van de huid is bescherming tegen invloeden van buitenaf. De huid heeft ook een functie bij het afscheiden van overtollig vocht, de regulering van de lichaamstemperatuur en de aanmaak van vitamine D. Door vallen, stoten, snijden, schaven en verbranden kan de huid beschadigen. Voor de behandeling van kleine snij-, schaaf- en brandwonden kan je VSM Derma wondgel gebruiken. De gel bevat Actieve Medische Ingrediënten, Olile-Active™ en Spirucal-Active™, die de natuurlijke wondgenezing bevorderen.

### ACTIEVE INGREDIËNTEN

Olile-Active™, Spirucal-Active™.

### OVERIGE INGREDIËNTEN

Aqua, Pentylene Glycol, Laureth-9, Sodium Polyacrylate, Citric Acid.

### VERPAKKING

Tube à 20 ml e

### TOEPASSING

Gebruik VSM Derma wondgel voor de behandeling van kleine snij-, schaaf- en brandwonden.

### WAT JE MOET WETEN VOORDAT JE VSM DERMA WONDGEL GEBRUIKT

Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden VSM Derma wondgel te gebruiken. Voor zover bekend kan VSM Derma wondgel in combinatie met geneesmiddelen worden gebruikt. Er zijn van VSM Derma wondgel geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Vraag bij twijfel je arts of apotheker om advies.

### BELANGRIJK

- VSM Derma wondgel is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
- Neem contact op met je huisarts wanneer de volgende klachten optreden:
  - Bij een allergische of overgevoeligheidsreactie of een ander ongewenst effect na gebruik van VSM Derma wondgel.
  - In geval van zwelling, rood of pijnlijk worden van de wond of verergering van klachten.
- Gebruik VSM Derma wondgel niet wanneer er sprake is van hevige vochtscheiding of infectie van de wond.
- Vermijd contact met de ogen. Indien het in de ogen terecht komt uitspoelen met overvloedig water, daarna een arts raadplegen.
- Zorg na gebruik dat de tube goed afgesloten is, zodat uitdroging wordt voorkomen.

### ALS JE ZWANGER BENT OF BORSTVOEDING GEEFT

Voor zover bekend kan VSM Derma wondgel gebruikt worden tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding, indien je je houdt aan het gebruiksvorschrift. Vraag bij twijfel je arts of apotheker om advies.

### VANAF WELKE LEEFTIJD IS VSM DERMA WONDGEL TE GEBRUIKEN?

VSM Derma wondgel is te gebruiken vanaf 0 jaar.

### HOE GEBRUIK JE VSM DERMA WONDGEL?

Was voor gebruik je handen. Breng een kleine hoeveelheid VSM Derma wondgel aan op je vingertoppen. Verdeel de gel over de wond tot deze volledig is bedekt. Was na gebruik opnieuw je handen. Herhaal de handeling twee tot drie maal per dag of vaker indien gewenst. Laat de gel enkele minuten intrekken voor het aantrekken van kleding en/of schoenen.

### HOE BEWAAR JE VSM DERMA WONDGEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren op een droge en donkere plaats bij kamertemperatuur (15 - 25°C).

15°C / 25°C

Gebruik VSM Derma wondgel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat vermeld op het doosje en de tube bij het zandloperteken.

### ADVIES

Voor meer informatie of advies kun je terecht op [www.vsm.nl](http://www.vsm.nl) of bel met de gratis VSM Advieslijn 0800-9011.

### MILIEU

Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

### VSM GEEFT JE KRACHT UIT DE NATUUR

Je kiest bewust om op een natuurlijke manier voor je gezondheid te zorgen. VSM begrijpt dat. VSM is een bedrijf met een groen hart. Voor jou ontwikkelen en produceren wij producten die hun oorsprong vinden in de natuur en die je gezondheid ondersteunen. Dit doen we al meer dan 100 jaar op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Zo geeft VSM je kracht uit de natuur.

 <b>Fabrikant:</b>	<b>Distributeur:</b>
Medical Brands	VSM Geneesmiddelen bv
Developments B.V.	Berenkoog 35
Piet Heinkade 199	1822 BH Alkmaar
1019 HC Amsterdam	Nederland
Nederland	

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in januari 2015.

vsm geeft je kracht  
uit de natuur



20WGVSML.NL.1.00